

Brukerveiledning


Bryterarm med medium klo

Produktet kan brukes inne og ute.
Produktet kan rengjøres med lett fuktet klut og mild såpe ved behov.
Unnvik løsemidler


Produktet har en forventet levetid på 7 år etter at det er tatt i bruk.
Avhengig av bruk kan denne tiden være betraktelig lengre.
Ved feil, kontakt distributør av produktet, for veiledning og reparasjon

Produktet samsvarer med krav i
MDR (Medical Device Regulation (2017/745/EU))

Produsert av Ergo ConTech.

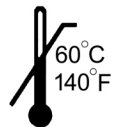

www.ergocontech.com

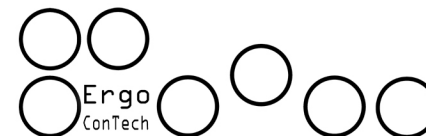

Bryterarm med medium klo.

Produktet inneholder RAM® Tough-Claw™ og ulike deler som gjør det mulig å feste bryterløsningen mange steder, og i mange posisjoner for best mulig tilrettelegging. Det ytre leddet har en 1/4" innvendig gjenge som monteringsplate kan festes mot.

Monteringsplate og bryter er ikke inkludert.


Produktet er til bruk for personer som trenger brytere i direkte nærhet til hånd, for å betjene funksjoner med hjelp av brytere. (PC, spill, omgivelseskontroll, etc.)

Produktet kan monteres ulike steder for eksempel på rullestoler, bordben eller andre steder innen Tough-Claws gripeevne. Tough-Claws gripeevne er høy og kan derfor lage merker i objekter som den festes på. Vurder eventuell risiko for dette, før montering, da skader produktet påfører andre objekter, ikke erstattes.

Produktet leveres i 7 deler som må monteres før bruk.



Monter delene som vist under gjennom å åpne låserattet på delene og før inn kuleledd i åpningene. Stram deretter låserattet ved å vri det med klokken i ønsket posisjon.

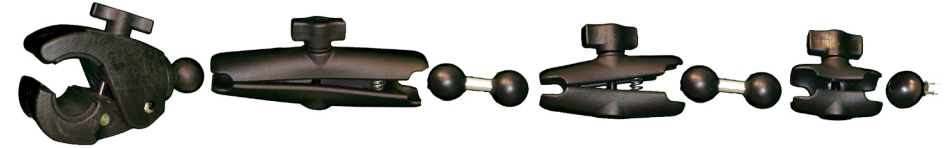

Det er mulig å bytte posisjon på de ulike segmentene i løsningen hvis dette gir en bedre tilpasning. Det er også mulig å fjerne deler hvis det er ønskelig med kortere arm. Ved bruk kan det forekomme sprekker i gummidetaljer på kuleledd etter langvarig bruk. Dette påvirker ikke funksjonen på produktet.

Art.nr.	RMAMK
Vekt	780 g
Total lengde	485 mm
Gripeevne runde rør	25 – 47 mm
Gripeevne flater	0 – 40 mm