

# Brukerveiledning


## Bryterarm til ERS-rails

Produktet kan brukes inne og ute.  
Produktet kan rengjøres med lett fuktet klut og mild såpe ved behov.  
Unnvik løsemidler

Produktet har en forventet levetid på 5 år etter at det er tatt i bruk.  
Avhengig av bruk kan denne tiden være betraktelig lengre.  
Ved bruk kan det forekomme sprekker i gummidetaljer på kuleledd etter langvarig bruk. Dette påvirker ikke funksjonen på produktet.  
Ved feil, kontakt distributør av produktet, for veiledning og reparasjon

Produktet samsvarer med krav i  
MDR (Medical Device Regulation (2017/745/EU))

Produsert av Ergo Contech.

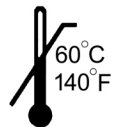

[www.ergocontech.com](http://www.ergocontech.com)



## Bryterarm til rails

Produktet inneholder ulike deler fra RAM® som gjør det mulig å feste armen til rails/ skinneløsninger som er på ulike rullestoler. (F.eks, Invacare, Permobil og Quickie)




Bryterarmen kan etter montering stilles i mange posisjoner for best mulig tilrettelegging. Det ytre leddet har en 1/4" innvendig gjenge som monteringsplate kan festes mot.

Monteringsplate og bryter er ikke inkludert.


Produktet er til bruk for personer som trenger brytere i direkte nærhet til hånd, for å betjene funksjoner med hjelp av brytere. (PC, spill, omgivelseskontroll, etc.)

Vurder eventuell risiko før montering, da skader produktet påfører andre objekter, ikke erstattes. Montering på rullestol bør utføres av person med kompetanse på aktuell rullestol og skinne/rail-systemet til den rullestolen. Følgende festemateriel til rail/skinner medfølger

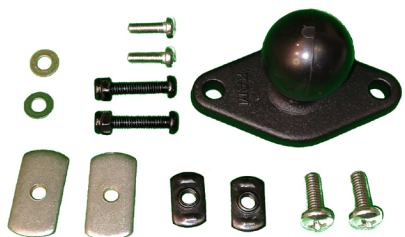


- (2) #10-32 T-Nuts
- (2) #10-32 Flat Weld Nuts
- (2) #10-32 x 1/2" Machine Screws
- (2) M4 x 12mm Machine Screws
- (2) M4 x 20mm Machine Screws
- (2) M4 Stainless Steel Washers
- (2) M4 Nylock Nuts

Produktet leveres med følgende deler som må monteres sammen.

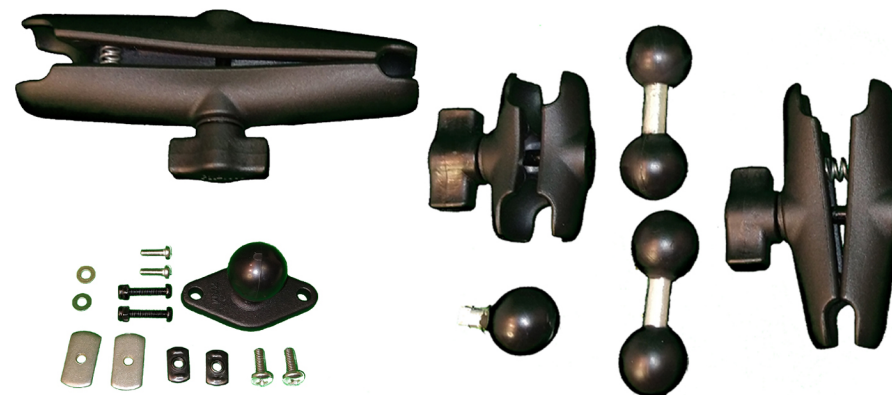

Monter først delen som fester i rullestolens rail/skinner. Monter siden delene som vist under gjennom å åpne låserattet på delene og før inn kuleledd i åpningene. Stram deretter låserattet ved å vri det med klokken i ønsket posisjon.

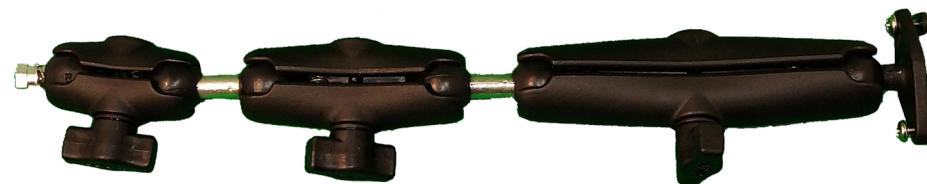

Det er mulig å bytte posisjon på de ulike segmentene i løsningen hvis dette gir en bedre tilpasning. Det er også mulig å fjerne deler hvis det er ønskelig med kortere arm.

Art.nr.	RMAR
Vekt	564 g
Total lengde	390 mm