


Monterings- plate N4

1002540

Brukerveiledning
Norsk v. 1

Monteringsplaten er utstyrt med en ¼-20 tommer gjenget stang. Den kan brukes med forskjellige monteringsarmer og monteringsløsninger med ¼ 20 tommer hull. Bryter er ikke inkludert.

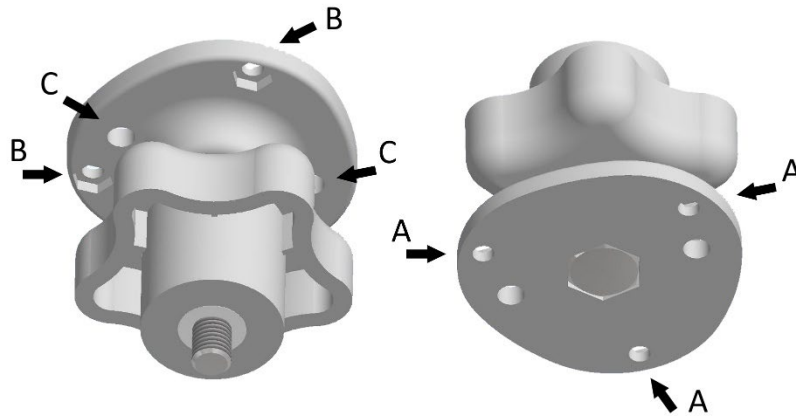

-Innhold:

Monteringsplate
med låsmutter UNC 1/4

3 x M3 skrue
3 x M3 mutter
2 x UNC 6-32 skrue
2 x M4 skrue

Brukerveiledning

Beskrivelse:

Monteringsplate for bryterne som går under salgs navn *Specs*, *Little candy corn 2*, *Buddy Button*, *KajoButton 50*, *KajoButton 100*, *Kajo Soft*.

Produktet muliggjør fastmontering av nevnte brytere på bryter-armer og lignende med 1/4 UNC gjenge hull. Skruer og muttere for å feste bryterne til platen medfølger.

Montering Specs:

- Plassér bryteren over monteringsplaten, og monter de 3 M3-skrueene i hullene på bryteren, og gjennom de tre hullene på monteringsplaten (A).
- Trykk deretter mutterne inn i utsparingen (B) på undersiden av monteringsplaten.
- Stram skruene med en stjerneskrutrekker fra oversiden samtidig som mutterne holdes inne mot utsparingen.
- Stram skruene slik at de sitter godt fast.
- Plassér bryteren og monteringsplaten på monteringsarmen. Og skru den på plass. Når den er på plass, strammer du låsemutteren med klokken for å feste den.

Montering , Little candy corn 2, Buddy Button:

- Skru av den store låsemutteren på undersiden av platen.
- Plassér bryteren over monteringsplaten og monter de 2 UNC 6-32-skrueene i hullene (C) gjennom undersiden av monteringsplaten.
- Stram skruene slik at de sitter godt fast.
- Skru på den store låsemutteren på undersiden av platen.
- Plasser bryteren og monteringsplaten på monteringsarmen. Og skru den på plass. Når den er på plass, strammer du låsemutteren med klokken for å feste den.

Montering KajoButton 50, KajoButton 100, Kajo Soft:

- Skru av den store låsemutteren på undersiden av platen.
- Plassér bryteren over monteringsplaten og monter de 2 M4-skruene i hullene (C) gjennom undersiden av monteringsplaten. (På *Kajo Soft* er skruehullene skjult under borrelås, som kan fjernes.)
- Stram skruene slik at de sitter godt fast.
- Skru på den store låsemutteren på undersiden av platen.
- Plassér bryteren og monteringsplaten på monteringsarmen. Og skru den på plass. Når den er på plass, strammer du låsemutteren med klokken for å feste den.

Merk! Produktet inneholder små deler som kan løsne etter langvarig bruk. Det anbefales å kontrollere behov for stramming av skruene etter en tids bruk. Skruer som eventuelt løsner kan gi helserisiko hvis de puttes i munnen. Unnvik bruk hvis risiko for dette foreligger. Produktet er laget for innendørs bruk. Produktet har en forventet levetid på 5 år etter at det er tatt i bruk. Avhengig av bruk, kan denne tiden være betraktelig lengre. Ved feil, kontakt distributør av produktet, for veiledning og reparasjon.

Produktet samsvarer med krav i MDR (Medical Device Regulation {2017/745/EU})

Produsert av Ergo Contech. www.ergocontech.com

